

# ampcare

## E Series

Self-adhering Reusable Stimulating  
Electrodes with 0.08" Socket/Pin  
Connector

Distributed in the USA by:

**Ampcare, LLC**

1120 South Freeway  
Fort Worth, Texas 76104

Tel: 682-561-2444

www.ampcarellc.com

info@ampcarellc.com

お問い合わせ先(日本)：

**伊藤超短波株式会社**

**メディカル営業部**

〒332-0017 埼玉県川口市栄町 3-1-8

TEL.048(254)1012(代) FAX.048(254)1014

### 有資格者使用注意

本品の注文及び販売は、医師（もしくは正式に認可された医療従事者）に限定されています。

### 使用目的・適応

アンプケアのEシリーズ導子は患者の皮膚へ電気刺激を与える目的で使用します。

以下が使用用途の例です。


- 1) 頸部周囲筋のEMS（筋電気刺激）としての使用。
- 2) FES（機能的電気刺激）としての使用。
- 3) 外部刺激による咽頭収縮に関わる筋群の筋再教育を含む、NMES（神経筋電気刺激）としての使用。

### 禁忌

- 1) 本導子をペースメーカーなどの特定の植込み形機器保有者には使用しないでください。これらとの併用は電気ショック、火傷、電氣的干渉影響や死亡に繋がる可能性があります。
- 2) 頸動脈洞上への導子の貼り付けは避けてください。

### 導子の取り扱い説明

- 1) 導子の貼付時や取り外しの際は、治療器の電源が入っていないことを必ず確認してください。
- 2) 導子貼付部位を石鹸と水で洗浄し、完全に乾かしてください。導子は傷のないきれいな皮膚の上のみ配置してください。
- 3) 導子をシートに貼り付けた状態で電極ケーブルと導子を接続してください。
- 4) 導子をシートからはがす際は、導子の端を丁寧につまみながらシートからはがしてください。
- 5) 有資格者が示す正確な皮膚の位置に貼り付けてください。まず導子の中央を皮膚に接触させてから、端まで伸ばすように貼り付けてください。
- 6) 電極ケーブルを治療器に接続してください。

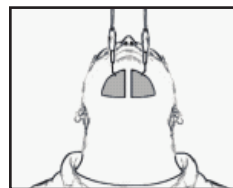

導子の貼り付け例

有資格者は上記「使用目的・適応」に記載されている特定の治療目的を遵守した上で、最大使用可能な時間を選択してください。

## 導子のはがし方

- 1) 選択した治療プログラムの終了後に治療器の電源を切ってください。
- 2) 導子を端からつまみながら皮膚からはがしてください。
- 3) 導子を専用シートに貼り、専用収納袋に入れてチャックを閉めてください。

## 警 告

- 1) 致命的な心臓のリズム障害（不整脈）を引き起こす可能性もあるので、胸部を挟み込む（心臓を左右から挟み込む）ように導子を配置しないでください。
- 2) 導子を開放創、発疹、腫脹・発赤・感染・炎症のある部位に使用しないでください。  
（例：静脈炎、血栓症、静脈瘤等）
- 3) がん組織のある部位、あるいはその近辺に導子を配置しないでください。

## 注 意

- 1) 経皮的粘着導子の人体における長期的作用・影響は明らかではありません。  
電気刺激の脳への影響も解明しつくされていないことから、頭部を挟み込む形での導子の配置はしないでください。
- 2) 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 3) 感覚障害のある箇所へ導子を配置する際は注意をしてください。
- 4) 皮膚にしっかりと導子が貼り付かず粘着力が低下している場合は、導子を取り換えてください。

## 副作用

- 1) 導子下で電気刺激による皮膚かぶれや火傷を起こす可能性があります。
- 2) 眼・顔や頭部付近への貼付により使用中・使用後に頭痛やその他の痛みを誘発する場合があります。

## 使用に関する推奨

- 1) 導子は正常で、傷がなく、きれいで健康的な皮膚部位で使用してください。
- 2) 導子の大きさ・形状・種類により、与えられる電気刺激の効果や安全性に影響を及ぼす可能性があります。
- 3) 導子の電气的性能はその安全性や効果に影響を及ぼす可能性があります。
- 4) 小さな導子や不適切な箇所への導子の貼付で不快感や火傷を誘発する可能性があります。
- 5) 本導子が適応可能か不明な場合は、導子と共に使用する治療器メーカーへ問い合わせ確認を行ってください。

## 使用・保管・洗浄について

- 1) 感染や有害作用の可能性があるので、導子は複数人で共有しないでください。
- 2) アンブケアの E シリーズ導子は複数人で共有せず個人で使用してください。
- 3) 導子の寿命は使用者の皮膚の状態、使用時の準備方法、刺激種類、保管状況や使用時の気象に影響されます。導子の寿命を延長するには、不使用時は専用収納袋に入れてしっかりチャックを閉じてください。
- 4) 導子の使用後は、1～2 滴の水をつけて汚れや脂を取り除いてください。
- 5) 導子に汚れや劣化が見られたら取り換えてください。

## 使用期限について

使用期限は導子を梱包している袋に表示されています。期限切れの導子は使用しないでください。

[使用期限の読み方：例]  Use By: 20XX-△△ → 20XX 年△△月

